

## TAiMA<sup>XC</sup>

### INTRODUCTIE

De TAiMA rollator is stevig en licht en neemt - ingeklapt - maar weinig ruimte in. Hij ondersteunt bij alle wandelingen en boodschappen en biedt op het juiste moment een plekje om te kunnen zitten en uitrusten. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om alle functies van de rollator te leren kennen.

De hier beschreven rollator voldoet aan de normen van EU-richtlijn 93/42 betreffende medische hulpmiddelen.

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de leveringsomvang. De eigenaar moet deze bewaren en ook doorgeven bij het doorgeven van het product.

Wijzigingen door technische ontwikkelingen ten opzichte van de in deze gebruiksaanwijzing getoonde uitvoeringen voorbehouden.

Voor deze gebruiksaanwijzing worden aanpassingen niet doorgegeven. De actuele geldige versie kunt u bij ons verkrijgen.

Voor het kopiëren, vertalen en vereenvoudigen in welke vorm dan ook, ook gedeeltelijk, is de schriftelijke toestemming van de fabrikant noodzakelijk. Pa dis perferitam hil ea conectibus.

### INDICATIE EN GEBRUIKSDOEL

De TAiMA rollator dient als loophulp voor mensen met beperkte mobiliteit tot maximaal 150 kg lichaamsgewicht. Ook biedt de rollator een tijdelijke zitgelegenheid, om bij te komen.

De rollator mag alleen op een vaste en gelijkmatige bodem worden gebruikt. Gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder als opstapje of voor het transporteren van zware lasten, geldt als onbedoeld gebruik en is gevaarlijk.

### CONTRA-INDICATIE

De rollator dient niet te worden gebruikt bij:

- waarnemingsstoornissen
- sterke evenwichtsstoornissen
- bij een gewicht van meer dan 150 kg

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Hang geen tassen aan de handvaten - kantelgevaar!

Gebruik de remmen op hellingen (trek de remhendels naar boven).

Gebruik de rollator uitsluitend op een vaste en gelijkmatige ondergrond.

Bij te zwaar steunen op de handvaten kan de rollator naar achteren of opzij omkiepen.

Bij het in- / en uitklappen van de rollator kunnen kledingstukken en lichaamsdelen beklemd worden.

Let op dat onderdelen die blootstaan aan de zon warm kunnen worden en bij aanraking verbrandingen kunnen veroorzaken.


Zorg er voor het gebruik van de rollator voor, dat de inklapbeveiliging correct vergrendeld is.

Controleer voor elke rit of de remmen goed werken en of alle boutverbindingen goed vastzitten.

Blokkeer altijd beide remmen voordat u op de rollator gaat zitten.

Controleer de bandenspanning regelmatig als uw TAiMA luchtbanden heeft. -> model luchtbanden

De lading van de tas mag maximaal 5 kg wegen.

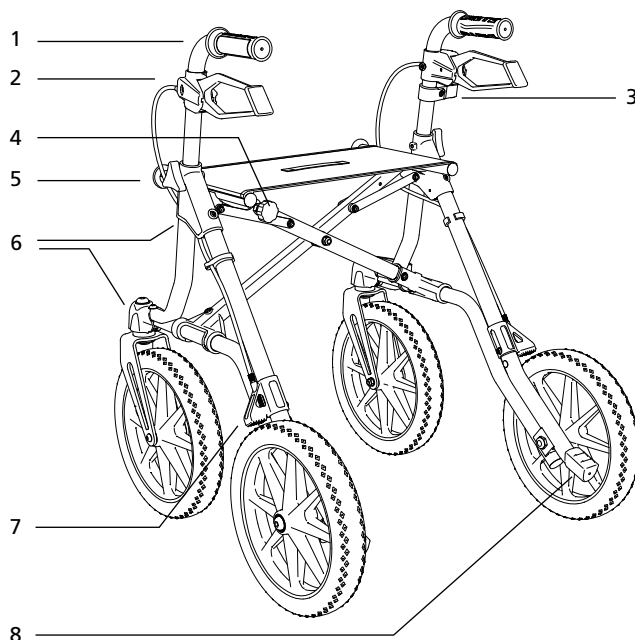


1. Ergonomische handvaten
2. Remhendel
3. Houder voor wandelstok
4. Sterschroef voor hoogteverstelling
5. Vergrendelingsknop / inklapbeveiliging
6. Reflectoren
7. Rem
8. Kantelhulp

## ROLLATOR NEERZETTEN / UITKLAPPEN

Plaats de rollator voor u in de gewenste rijrichting.

Druk nu met beide handen de steunbuizen van de zitting links en rechts naar beneden, totdat de inklapbeveiliging **A** hoorbaar vastklikt.


**WAARSCHUWING!** De rollator mag nooit zonder correct vastgeklikte inklapbeveiliging worden gebruikt.

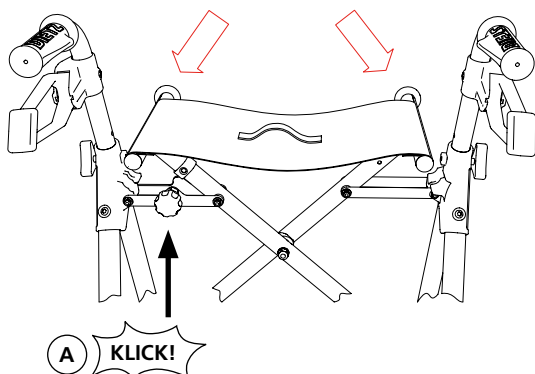

## ROLLATOR INKLAPPEN

Ontgrendel de inklapbeveiliging **A** door deze licht naar achteren te trekken en til de zitting met de trekus omhoog.

De rollator klappt nu vanzelf in.

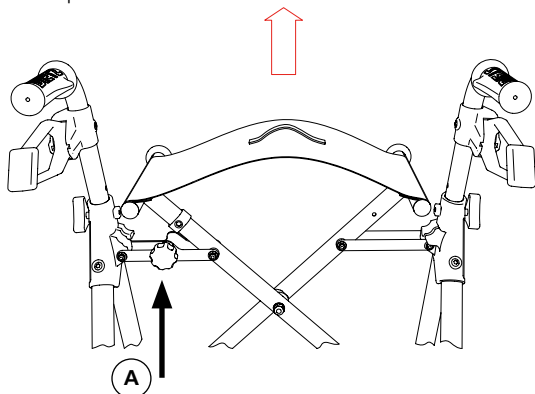


## HOOGTE VAN DE HANDVATEN INSTELLEN

Draai schroef **B** los en haal de sterschroef helemaal uit de buis.

Plaats vervolgens de handvaten op de gewenste hoogte.


Plaats sterschroef **B** nu terug en draai deze aan.

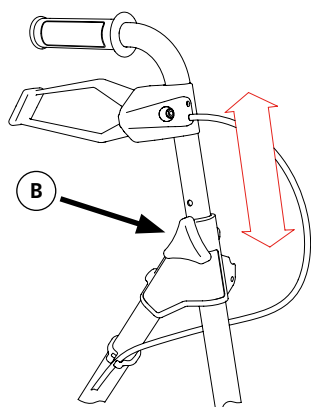

## REM INSTELLEN

De rem is correct ingesteld, als de remhendel en remkabel geen speling hebben en de wielen zonder aan te lopen draaien als de remmen los zijn.

Eventueel kan de remwerking met de stelschroef **C** aan de remkabel, op de remblokken van de achterwielen, worden ingesteld.

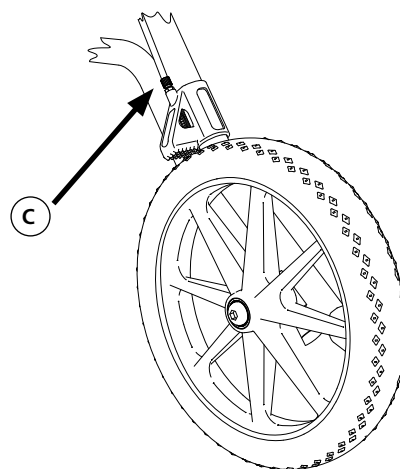


## LOPEN MET DE ROLLATOR

Ga in de rollator staan. Pak de handvaten met beide handen vast. Als u stevig staat, lost u beide remmen. Nu kunt u lopen.


- Schuif de rollator niet te ver voor u uit. Om een goede ondersteuning te waarborgen, moet de rollator dicht bij het lichaam blijven.
- Beheers eventueel het tempo door licht en gelijkmatig beide remhendels in te knijpen.
- Loop rechtop en kijk vooruit, om hindernissen bijtijds te herkennen en uit de weg te kunnen gaan. Het is niet aan te raden om met de rollator achteruit te lopen.

## REMMEN

Om de rollator tijdens het lopen te remmen, trekt u beide remhendels licht en gelijkmatig naar boven.

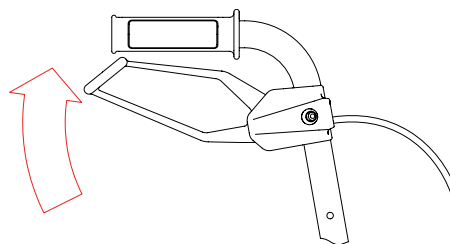


Druk de remhendels naar beneden om de remmen te blokkeren. Ze blijven vanzelf in deze positie staan. Trek de remhendels naar boven aan om de remmen te lossen.

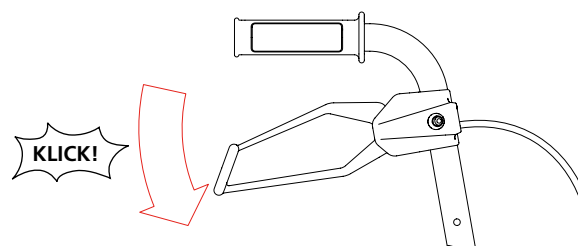

## KANTELHULP

Door met de punt van de schoen op de trapdop te duwen, wordt het optillen van de stuurwielen, en daarmee het opgaan van stoepranden en andere hindernissen gemakkelijker.  
Zorg er van tevoren voor, dat u met uw andere been stevig staat.

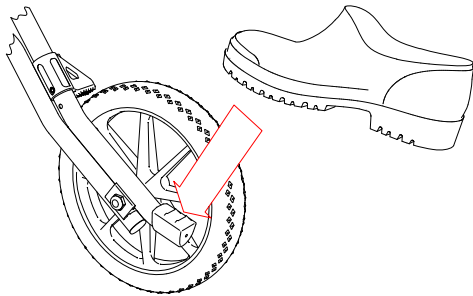

## TECHNISCHE GEGEVENS

	Luchtbanden	PU-banden
Hoogte	85 - 95 cm	
Hoogte ingeklapt	88 cm	
Zithoogte	61 cm	
Zitbreedte	44 cm	
Lengte	75 cm	
Breedte	67 cm	65 cm
Breedte ingeklapt	27 cm	25 cm
Max. gewicht gebruiker	150 kg	
Leeggewicht	9.1 kg	9.8 kg
Afmetingen banden	31 x 5 cm	
Hoogte handvaten verstelbaar	5 x 2,5 cm	
Max. belading tas	5 kg	

## LEVERINGSOMVANG

- Rollator TAiMA
- Stokhouder linkerkant / rechterkant monteerbaar
- Nettas
- Gebruiksaanwijzing

## REINIGING / ONDERHOUD / OPNIEUW GEBRUIKEN

### Reiniging

De rollator moet regelmatig schoon worden gemaakt en gedesinfecteerd. Gebruik daarvoor een mild zeepsop zonder schuurmiddel. U kunt met vrij verkrijgbare middelen desinfecteren. Gebruik geen stoomreinigers en geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen.

### Onderhoud

De TAiMA is grotendeels onderhoudsvrij. Als u vaststelt dat de remmen minder goed werken, de wielen zwaarder draaien of als er andere problemen optreden, breng uw rollator dan voor onderhoud naar uw vakhandel.

### Opnieuw gebruiken

Denk er bij het overdragen van de rollator aan de nieuwe gebruiker aan, dat u alle voor veilig gebruik nieuwe gebruiker aan, dat u alle voor veilig gebruik De rollator moet door de vakhandel - zoals hierboven beschreven - worden gecontroleerd, gereinigd en voor het opnieuw gebruiken in een optimale toestand worden gebracht.

## GARANTIE

De garantieperiode voor het aluminium frame bedraagt 5 jaar, voor alle andere onderdelen 24 maanden.

De garantie geldt niet voor slijtage en bij ondoelmatig gebruik van de rollator.

## ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

Rugbeugel "Standard" gevoerd  
Art. 290007

Rugbeugel "Komfort" gevoerd, extra breed  
Art. 290038

Eenhandig remsysteem, links of rechts  
Art. 290105 / 290104  
(alleen mogelijk bij PU-banden)

Paraplu ter bescherming tegen regen en zon incl. houder.  
Art. 601270 (rood)  
Art. 601271 (bruin - grijs)

Rollatortas  
Art. 290102

Cover, grijs  
Art. 297002



Dietz GmbH Reha-Produkte  
Reutäckerstrasse 12  
76307 Karlsbad Ittersbach  
Fax: +49 (0) 7248 / 9186 - 86  
Fon: +49 (0) 7248 / 9186 - 0  
www.dietz-reha.com

