

Reiniging van een ROHO® Dry Floatation® kussen en hoes


Reinig uw ROHO-kussen regelmatig voor een goede hygiëne en om ervoor te zorgen dat het kussen gedurende de gehele levensduur aan uw behoeften blijft voldoen. Volg de veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant voor alle chemische stoffen.

Belangrijk! Reiniging en desinfectie zijn twee verschillende processen. *Voer altijd een reiniging uit voordat u gaat desinfecteren.*

1. De ROHO-kussenhoes reinigen



Verwijder het kussen uit de hoes. Verwijder de optionele klittenbandsluitingen van de hoes, als die waren bevestigd.

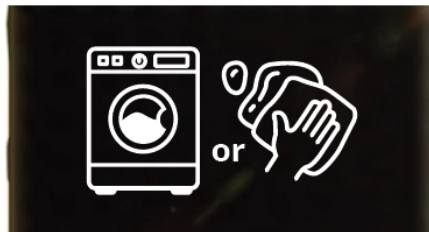


In de wasmachine wassen op een mild programma met koud water en een mild wasmiddel of met de hand wassen met warm water en een neutraal wasmiddel.




Drogen in de droogtrommel bij lage temperatuur of zonder warmte, of ophangen en aan de lucht laten drogen.


2. De ROHO-kussenhoes desinfecteren

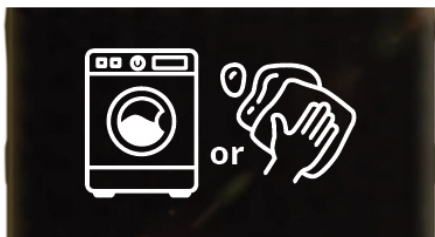

In de wasmachine wassen op een mild programma met warm water en een mild wasmiddel of met de hand wassen met warm water en een mengsel van 9 delen water en 1 deel bleekmiddel.

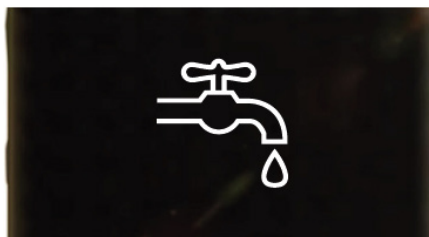

Spoel na met schoon water.

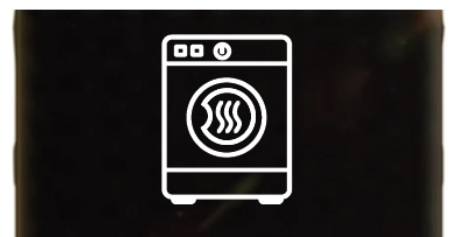

Drogen in de droogtrommel bij lage temperatuur of zonder warmte, of ophangen en aan de lucht laten drogen.


3. Het ROHO-kussen reinigen



Sluit alle ventielen.



Begin met spoelen en verwijder al het vuil tussen de kussencellen.

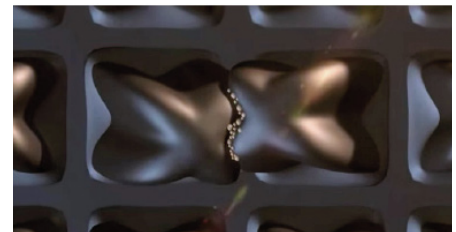

Wees voorzichtig tijdens het reinigen. Als een bepaalde stof op het kussen is gedroogd waardoor cellen aan elkaar plakken, probeer dan niet om de cellen te scheiden wanneer ze droog zijn. Daardoor kan het kussen beschadigd raken.




Controleer of de ventielen nog gesloten zijn. Plaats het product in een grote wasbak. Een schone douche of badkuip is ook acceptabel. Voorkom dat er water of reinigingsmiddel in het product terechtkomt.



Was het kussen met de hand met een mild afwasmiddel of wasmiddel.



Gebruik een zachte kunststof borstel, een spons of een washand om alle kussenoppervlakken zacht te borstelen.

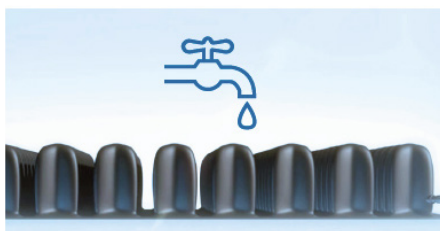

Spoel na met schoon water.



Hang het kussen op om het volledig aan de lucht te laten drogen.

4. Het ROHO-kussen desinfecteren




Herhaal de voorgaande reinigings-instructies met een oplossing van 9 delen warm water en 1 deel huishoudelijk bleekmiddel. De meeste kiemdodende desinfectiemiddelen zijn veilig als de verdunningsinstructies van de fabrikant worden gevolgd.




Laat het product 10 minuten weken in de bleekoplossing en spoel het vervolgens grondig af met schoon water.



Hang het kussen op om het volledig aan de lucht te laten drogen.

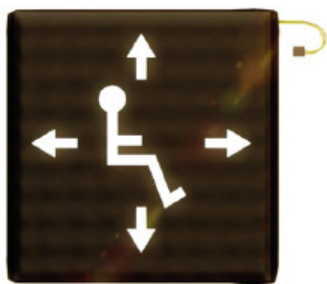

Als het kussen en de hoes droog zijn, plaatst u het kussen terug in de hoes. Gebruik de richtingslabels aan de zijkant van de kussenhoes om te controleren of het kussen correct is geplaatst.

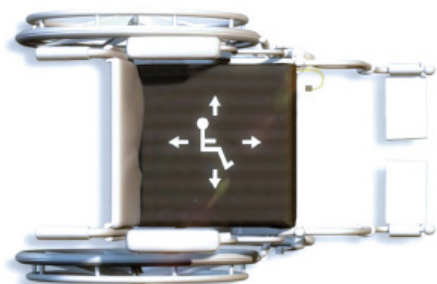

Rits de hoes dicht en plaats het kussen in de rolstoel. Gebruik ook nu weer de richtingslabels aan de zijkant van de kussenhoes om te controleren of het kussen correct in de rolstoel is geplaatst.

Opmerking: volg de instructies in de gebruikershandleiding die bij het kussen is geleverd, om het kussen in te stellen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw kussen is geleverd, voor meer informatie over het reinigen en desinfecteren van een ROHO-kussen, aanvullende instructies, voorzorgsmaatregelen en informatie over sterilisatie. De volgende merken zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van Permobil ROHO Seating and Positioning: DRY FLOATATION® en ROHO®.