



- Zwei Größen 54 cm und 62 cm Sitzhöhe
- Gangschaltung für sichere Bergabfahrt
- Reflektoren, für mehr Sicherheit im Dunkeln
- edle **Tasche** mit vielen Funktionen
- Stoßdämpfend, dank weicher all-terrain Bereifung
- handschmiegsame Korkgriffe
- umfangreiches Zubehör

Der SALJOL - Carbon Rollator Design trifft auf Sicherheit - klein, leicht und intelligent!





Ein Hilfsmittel, das überhaupt nicht danach aussieht. Unser SALJOL Carbon Rollator besticht durch die dynamische Form der 50er Jahre und die durchdachten Funktionen. Korkhandgriffe sorgen für einen festen und sicheren Halt und gleichzeitig für ein edles Erscheinungsbild.

In der schicken, regendichten Tasche mit Veganleder-Applikation haben alle Habseligkeiten Platz. Diese ist mit nur einer Hand abnehmbar. Auch bergabfahren ist mit der Gangschaltung mit Fußpedal, andere nennen das Schleifbremse, kein Problem mehr!

Der SALJOL Carbon Rollator lässt sich auf 22 cm zusammenfalten und wiegt dabei nur 5,8 kg.









Ein Design - drei schicke Farben, back to the 50ties





British Racing Green





Midnight Blue





Star Silver

In wenigen Handgriffen zum Rollator

Der SALJOL Carbon Rollator ist leicht auseinander zu falten und sofort einsatzbereit. Einfach auf den roten Knopf drücken und den Rollator an den Handgriffen auseinander ziehen. Dann mit den flachen Händen die Sitzfläche sanft nach unten drücken, bis der Sitz einrastet. Schon kann die Fahrt beginnen.





Technische Daten:	CR 54	CR 62
max. Nutzergewicht	150 kg	150 kg
max. Zuladung der Tasche	5 kg	5 kg
Breite: offen	62 cm	62 cm
Breite: geschlossen	22 cm	22 cm
Sitzbreite	45 cm	46 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
max. Stützhöhe	88 cm	103 cm
min. Stützhöhe	76 cm	81 cm

Zwei Größen für maximalen Komfort

Den Carbon Rollator gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Für kleinere Personen eignet sich der CR 54 mit einer niedrigeren Sitzhöhe besonders gut. So sitzen und gehen Sie sicher. Die Handgriffe können in fünf Stufen angepasst werden.

Für mittelgroße bis große Personen ist der CR 62 die bessere Wahl. Die Handgriffe sind in neun Abstufungen individuell auf die Nutzergröße anpassbar. Bis zu einer Stützhöhe von 103 cm. Um die Höhe der Handgriffe zu verstellen, müssen lediglich zwei Schrauben gedreht werden.

103 cm

88 cm

62 cm 54 cm



Sitzhöhe

Stützhöhe

Einer der sichersten Rollatoren der Welt!

Sie sind auch im Dunkeln immer gut sichtbar, dank vier Reflektoren an der Rückseite des Rollators und drehenden Speichenreflektoren an den Rädern, wie von der Polizei und den Verkehrswachten empfohlen.



Jedes Rad ist mit Speichenreflektoren ausgestattet.









Die leicht erreichbaren Handbremsen machen ein schnelles und sicheres bremsen möglich. Die Bremse wird bei leichtem ziehen der Bremsgriffe aktiv.

Um sicher im Rollator zu stehen, sollten Sie die Bremsgriffe gezogen halten, zum Gehen lösen Sie die Bremse. Durch das nach unten drücken der Bremsen wird die Parkbremse aktiviert. Dadurch wird ein Wegrollen auf unebenen Untergründen verhindert.

Den passenden Rollwiderstand stellen Sie über die Schleifbremse ein. Wir nennen das Gangschaltung mit Fußpedal.



Ein durchdachtes Produkt mit vielen Vorteilen

Diese Henkeltasche ist bis zu 5 kg belastbar. Sie können sie mit einer Hand abnehmen. Durch einen Magnetverschluss ist sie sehr einfach zu öffnen und zu schließen. Sehr schick und funktional, mit einer regendichten Handyhülle sowie hellem Innenfutter, so dass verstaute Gegenstände leichter gefunden werden. Dezente Reflektionsfelder, für eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln, links und rechts ein Netz für Getränke oder Regenschirm sowie zwei Ösen zum Einhängen einer Frontoder Fußraum Beleuchtung ergänzen den Rollator.













Ideal für Fahrten auf allen Untergründen

Durch die all-terrain Bereifung mit Seitenprofil werden Stöße sehr gut absorbiert. Mit unse- ren Rollator können Sie problemlos und sicher über Kieselsteine und Kopfsteinpflaster fahren, auch auf glattem Untergrund glänzt er mit Grip und Bremsfähigkeit.

Gangschaltung jetzt serienmäßig

Durch die Gangschaltung an den Hinterrädern lässt sich die Gehgeschwindigkeit reduzieren, sprich der individuelle Rollwiderstand wird einfach eingestellt. So kommen Sie sicher jeden Berg hinunter und der Rollator läuft nicht mehr ungewollt vor dem Nutzer weg und gibt den Halt, den der Nutzer braucht.

Kork - ein nachwachsender Rohstoff

Kork ist ein Naturprodukt. Kork ist leicht und sehr elastisch. Seine angenehme Haptik und rutschfeste Struktur eignen sich besonders für Griffe, zum Beispiel im Sportbereich oder bei Haushaltsgeräten.

Eigenschaften:

- UV-beständig
- beständig gegen Schweiß
- rutschfest
- Naturkork-Optik
- abriebfest















SALJOL empfiehlt

Einstellen der richtigen Griffhöhe: Lassen Sie die Arme locker herabhängen. Die Griffe sollten etwa auf Höhe der Handgelenke eingestellt werden.

Überwinden von Bordsteinkanten und Türschwellen: Fahren Sie schräg an kleinere Hindernisse heran und schieben Sie die Vorderräder einzeln über die Kante. Ihr SALJOL Carbon Rollator verfügt über eine Ankipphilfe, kleine Tritthebel auf Höhe der Hinterräder. Einfach mit dem freien Fuß auftreten.

Ist die Bordsteinkante dennoch zu hoch, suchen Sie sich am besten eine Stelle, an der die Gehsteigkante abgesenkt ist.

Stockhalter-Set magnetisch

Dieser einzigartige Stockhalter hält ihre Gehhilfe fest am Rollator.

Ein Magnet am Rollator Griff, der Taler, ein weiterer an Ihrer Gehilfe. Schnell angebracht, fertig! Links wie rechts.

Unkompliziert und nahezu von selbst, findet Ihre Gehilfe Ihren Platz. Mit leichtem Ruck löst sie sicher wieder, fällt aber nicht aus dem Körbchen.

Einfachste Bedienung, intuitive Führung!

Stockhalterung Standard

Sie benötigen eine zweite Stockhalterung für Ihren Carbon Rollator, da Sie zwei Gehhilfen benötigen?

Die Stockhalterung lässt sich einfach am Rahmen und der Höhenverstellung des Rollators befestigen. Klicken Sie zunächst das Körbchen an der Innenstange von unten an und drehen dieses nach außen um. Fixieren Sie das Körbchen mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

Als nächstes befestigen Sie die Zwinge an der Höhenverstellung des Rollators (unterhalb der Handgriffe) mit Hilfe der anderen beiden Schrauben. Alternativ können Sie auch den Taler verwenden. (Siehe Stockhalter-Set magnetisch).













SALJOL empfiehlt

Die richtige Körperhaltung beim Gehen:
Laufen Sie im Rollator und nicht dahinter!
Schieben Sie ihn deshalb nicht wie einen Einkaufswagen vor sich her, das birgt die Gefahr eines Sturzes. Durch einen möglichst geringen Abstand zwischen Körper und Rollator beugen Sie außerdem Rückenschmerzen vor.

Zusammen- und Auseinanderfalten: Premiumrollatoren werden längs zusammengefaltet. Dazu ziehen Sie einfach den Entriegelungsgurt auf der Sitzfläche nach oben, drücken die Tragegriffe zusammen und fixieren den roten Knopf mit einem Klick.

LED-Lampe

Mit der hellen LED-Lampe sind Sie im Dunklen gut sichtbar. Außerdem leuchtet Ihnen die Lampe den Weg und weißt Sie somit auf Hindernisse hin. Mit einer zweiten LED Lampe können Sie den Fußraum ausleuchten. So sehen Sie auch kleinere Hindernisse und z.B. Hundehaufen.

Klappen Sie den Haken aus der Halterung an der Rückseite der Lampe nach oben und führen Sie den Haken in die dafür vorgesehene Schlaufe an der Rollator-Tasche.

An der unteren Seite der Lampe können Sie diese anschalten. Die LED-Lampe ist auch an vielen anderen Einsatzorten universal nutzbar. Einfach, weil Batterie betrieben.

faltbarer Regenschirm

Mit einem Regenschirm werden Sie bei schlechtem Wetter nicht nass. Dieser Regenschirm hat den zusätzlichen Vorteil, dass er an Ihrem Rollator links oder rechts befestigt werden kann. So können Sie beide Hände an den Handgriffen Ihres Rollators lassen und sind sicher und trocken unterwegs.

Einstellung und Befestigung sind einfach.

Mit zwei Gelenken bestimmen Sie die Position und Neigung des Schirms, damit Sie nicht nass werden.

Bei schönem Wetter klappen Sie ihn einfach weg.

















Tasche für Sauerstoffflasche

Die Tasche ist wunderbar für den Transport einer Sauerstoffflasche geeignet. Sie lässt sich mit einer Stoffklappe in die Innenseite der Rollator-Tasche stecken.

Durch die Henkel können Sie die Sauerstoffflaschen-Tasche leicht herausnehmen und gegebenenfalls mitnehmen.

Rollator-Klingel

Durch eine Klingel an Ihrem Rollator können Sie im Straßenverkehr auf sich aufmerksam machen.

Einfach anschrauben und los klingeln. Die Klingel lässt sich links und rechts montieren.

Tasche

Die Tasche lässt sich durch den Magnetverschluss mit einer Hand leicht öffnen und schließen. Links und rechts an der Seite befindet sich ein Netz, z.B. für Flaschen. Die Tasche hängen Sie ganz einfach ein und können sie mit einer Hand abnehmen. Durch das helle Innenfutter und die drei separaten Fächer, finden Sie Ihre Habseligkeiten leichter.

















verstellbarer Rückengurt

Ein Rückengurt ist sehr angenehm, wenn Sie Ihren Rollator auch viel zum Sitzen verwenden. Sie können sich bequem anlehnen und es besteht keine Gefahr, dass Sie nach hinten umkippen.

Befestigen Sie den Rückengurt mit den mitgelieferten Schrauben, sowie dem Imbusschlüssel an den Innenseiten der Handgriffe des Rollators. Durch die Verstellbarkeit des Rückengurts können Sie die ideale Position für sich finden. Auch für große Menschen geeignet.

gepolsterter Sitz

Der gepolsterte Sitz verbessert Ihren Halt, wenn Sie auf dem Rollator sitzen. Sie sitzen aufrecht und sicher.

Außerdem ist er sehr komfortabel und bequem. Legen Sie den Sitz einfach auf das Sitznetz des Rollators und befestigen Sie diesen, indem Sie leicht drücken bis die Klammern unter die Sitzstangen greifen.

Für den Transport einfach in die Rollatortasche legen.

Tablett

Mit Hilfe eines Tabletts lassen sich verschiedene Dinge leicht transportieren. So wird Ihr Rollator zum Servierwagen. Legen Sie das Tablett mit der breiten Seite nach vorne auf die Sitzfläche des Rollators und achten Sie darauf, dass die Aussparungen links und rechts auf den Sitzstangen liegen. Ein Anti-Rutsch-Netz erhöht die Sicherheit.

Konfigurieren Sie Ihren Carbon Rollator

Produktbeschreibung	Artikelnummer	Preis	Stück
SALJOL Carbonrollator, 62 cm, British Racing Green	4058789009031	599,00 €	
SALJOL Carbonrollator, 62 cm, Midnight Blue	4058789009048	599,00 €	
SALJOL Carbonrollator, 62 cm, Star Silver	4058789009055	599,00 €	
SALJOL Carbonrollator, 54 cm, British Racing Green	4058789009437	599,00 €	
SALJOL Carbonrollator, 54 cm, Midnight Blue	4058789009444	599,00 €	
SALJOL Carbonrollator, 54 cm, Star Silver	4058789009451	599,00 €	
Stockhalter-Set magnetisch	4058789009659	29,00€	
Stockhalterung Standard	4058789009284	19,00 €	
LED-Lampe	4058789009093	10,00 €	
Regenschirm, schwarz	4058789009215	69,00 €	
Tasche für Sauerstoffflasche	4058789009208	45,00 €	
Klingel, rot	4058789009222	9,90 €	
Tasche, schwarz	4058789009260	39,00 €	
Rückengurt, einstellbar, schwarz	4058789009185	39,00 €	
fester Sitz, schwarz	4058789009635	39,00 €	
Tablett, schwarz	4058789009642	29,00 €	
Gesamtpreis:	*		

Bemerkungen:	
Demer Kungem.	

Name:	Vorname:
Straße:	PLZ / Ort:
Telefon:	E-mail:
Datum	Unterschrift





SALJOL GmbH | Hubertusstraße 8 82256 Fürstenfeldbruck | Germany www.saljol.de | hallo@saljol.de Tel. 0800 5050 269 | Fax. 08141 317 74 11 Nice2move
Diezerplein 26
8021 CV Zwolle
info@nice2move.nl

www.nice2move.nl

Fachhändler Stempel