

ROHO QUADTRO SELECT

Voor de **BASIS** INSTELLING van het ROHO kussen is het aan te raden deze op atmosferische druk te brengen. Het kussen zal dan een goede druk verdeling bieden en comfortabel zijn om op te zitten. Wees ervan bewust dat het ROHO kussen evenals de hoes te wassen zijn in de wasmachine.



Druk de groene knop in en open het ventiel.



Blaas het kussen op met de ROHO pomp totdat alle cellen bol staan.




Verwijder de pomp. Sluit het ventiel niet!
Laat de lucht uit het kussen lopen.



Luister of voel met de hand of er geen
lucht meer uit het kussen komt.



Sluit het ventiel.

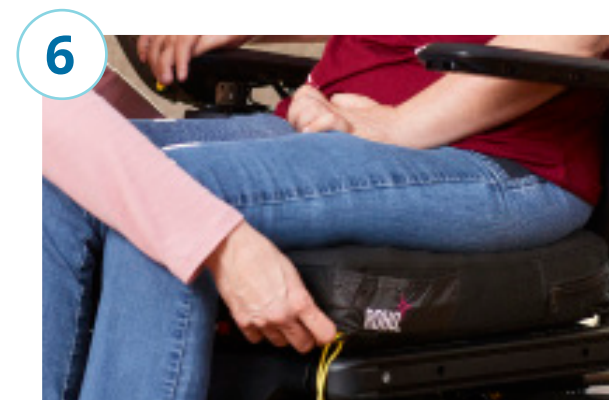

Plaats het kussen en maak de transfer
naar het zitkussen. Wacht 1 minuut en
druk dan de rode knop in.


ROHO QUADTRO SELECT

Een hand check moet regelmatig worden uitgevoerd.




1

Breng je hand tussen het kussen en de gebruiker, totdat je de tuber ischiadicum bereikt.

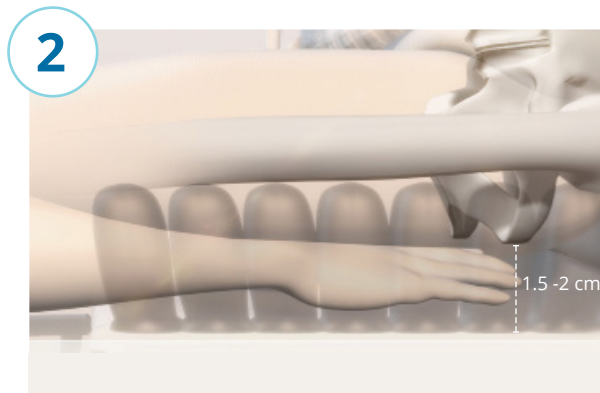


2

Controleer de hoeveelheid lucht in het kussen door je vingers te bewegen. Er moet 1,5 tot 2,5 cm zijn tussen de tuber ischiadicum en de bodem van het kussen.

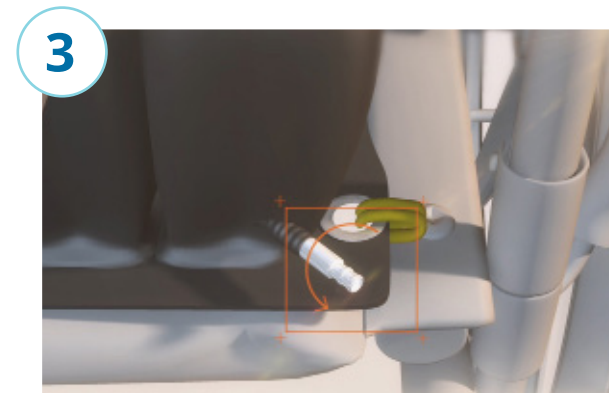

3

Zorg voor een optimale inzinking en omvatting door lucht toe te voegen of te laten ontsnappen. Sluit daarna het ventiel.

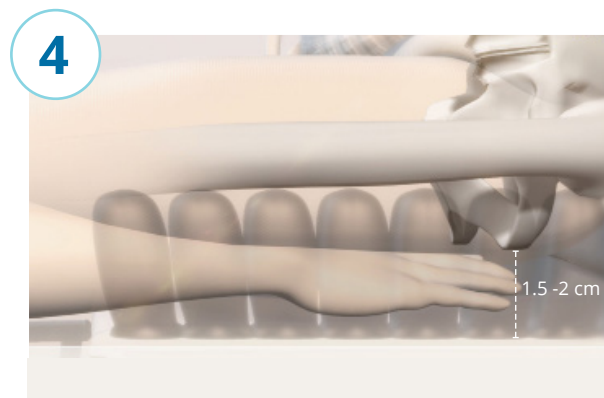

4

Zorg ervoor dat de ruimte tussen de tuber van de gebruiker en de onderkant van het kussen weer tussen 1,5-2,5 cm ligt.



Controleer de hoeveelheid lucht in het kussen regelmatig.



Blijf het ROHO kussen gebruiken om zeker te zijn van een optimale bescherming en ultieme zitervaring.